

Hygienesicherheit auf der ganzen Linie!

m
MEIKO

TopLine 40 E

Reinigungs- und Desinfektionsautomat

Gruppe
7

Das MEIKO-Sanierungskonzept für den Pflegebereich



TopLine 40 E ist ein Medizinprodukt im
Sinne des Medizinproduktegesetz (MPG)

m
MEIKO
TopLine

1. Ein unreiner Arbeitsraum, wie man ihn in der Praxis noch häufig antrifft. Eine Pflegekombination in noch gutem Zustand.



Der vorhandene Steckbeckenspüler ist jedoch technisch veraltet und erfüllt weder die aktuellen Anforderungen seitens der Hygiene noch der relevanten Normen.

2. Der technisch veraltete Steckbeckenspüler wird von der Pflegekombination sowie den Zu- und Ablaufleitungen getrennt.



3. Es folgt die Demontage und der Abtransport des Altgerätes.



4. Die verbliebene Tischanlage wird zum Einbau vorbereitet.



PRAKTISCH, SCHNELL, FUNKTIONELL

In 10 Schritten auf höchstem Hygiene-Niveau

In vielen Pflegeinstitutionen, die bis zum Ende der 80er Jahre erstellt wurden, entsprechen die unreinen Arbeitsräume häufig nicht mehr den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Anforderungen seitens der Hygiene und des Pflegepersonals. Speziell für den schnellen Austausch von technisch veralteten Untertischmodellen ist unser MEIKO TopLine 40 E konzipiert. In kürzester Zeit und ohne den Arbeitsprozess auf der jeweiligen Pflegestation zu behindern, kann der Austausch vorgenommen werden. Das TopLine 40 E wird maßgenau in die bestehende Tischanlage, unabhängig vom ursprünglichen Fabrikat, eingepasst und an die vorhandenen Zu- und Abläufe angeschlossen.

5. Der Reinigungs- und Desinfektionsautomat TopLine 40 E wird an die bestehenden Schrankbauten angepaßt. Die erforderlichen Verbindungen werden vorbereitet.



6. Einbau und Anschlussmontage des MEIKO TopLine 40 E an die bauseitigen Ver- und Entsorgungsleitungen.



7. Ein letztes Mal wird die Schrankanlage justiert. Danach wird sie mit dem TopLine 40 E fest verschraubt.



10. Es ist vollbracht!

Der unreine Arbeitsraum ist mit einem neuen MEIKO Reinigungs- und Desinfektionsautomaten ausgestattet. Der kostenfreien Einweisung des Gerätebeauftragten gemäß den Vorgaben der Medizinprodukte-Betreiberverordnung steht nichts mehr im Weg.



9. Die umgebaute Anlage wird zur bauseitigen Wand dauerelastisch verfugt und einer letzten Funktionsprüfung unterzogen.

8. Die Arbeitsplatte wird ausgerichtet und fest mit der Schrankanlage und dem Reinigungs- und Desinfektionsgerät verbunden.




Der Umbau von vorhandenen Altgeräten durch diverse Umbausätze kann nicht mehr empfohlen werden. Diese Altgeräte werden durch den Umbau gesetzlich wie Neugeräte behandelt und müssen somit die gleichen Auflagen wie neue Medizinprodukte erfüllen. Im Detail bedeutet dies, dass für jedes Gerätemodell ein vollständiges

„Master Device File“ mit detaillierten Konstruktionszeichnungen, Risiko- und Gefahrenanalyse und einer kompletten technischen Dokumentation erstellt werden müssen. Des Weiteren muss auch die Hygieneleistung dem aktuellen Stand der medizinischen Kenntnisse entsprechen.

Vorteile des MEIKO Schnell-Sanierungskonzept TopLine 40 E:

- Der MEIKO Reinigungs- und Desinfektionsautomat TopLine 40 E ist ein Medizinprodukt entsprechend den Anforderungen der europäischen Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG und gemäß dem Gesetz über Medizinprodukte (MPG).
- Der TopLine 40 E entspricht den Anforderungen gemäß DIN EN ISO 15883.
- Der TopLine 40 E ist anpassbar an alle bauseits vorhandenen Nischenmaße.
- Das Gerät ist wahlweise mit oder ohne Sockel lieferbar.
- Auf Wunsch ist der TopLine 40 E auch erweiterbar um einen Ausguss mit separater Randspülung.
- Der TopLine ist optional mit zusätzlicher Arbeits- bzw. Tischplatte in beliebiger Länge und diversen Hygienearadien lieferbar.
- Der MEIKO Reinigungs- und Desinfektionsautomat TopLine 40 E ist auch an die bauseits zentrale Dampfleitung anschliessbar.

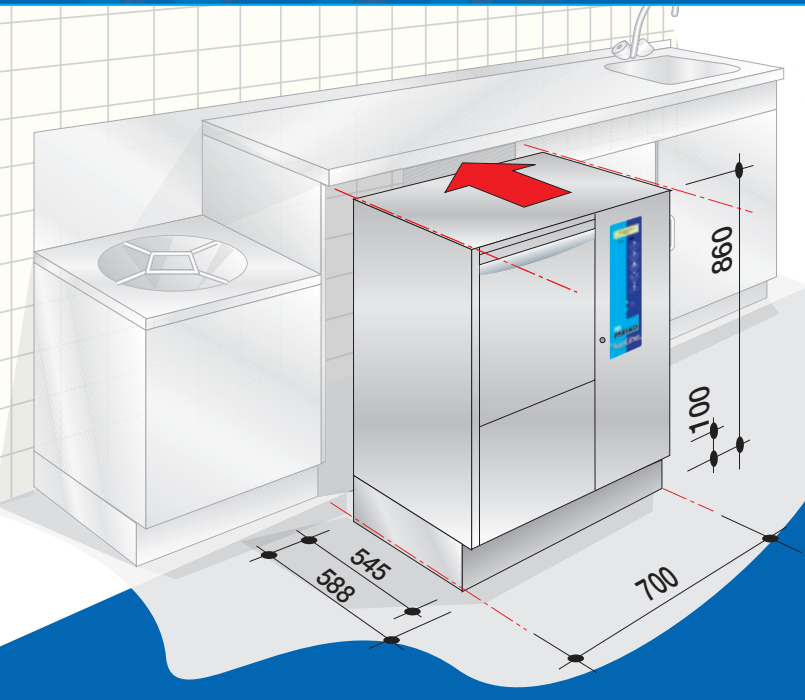

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstraße 3 · 77652 Offenburg · Germany
Tel. +49(0)781 / 203-0 · Fax +49(0)781 / 203-1229
E-Mail: info@meiko.de
<http://www.meiko.de>